

M

STUDIO

Software

MedRx[®]

Podręcznik instalacji oprogramowania Studio





0123

TÜV SÜD Product Services GmbH

Ridlerstraße 65 • 80339 Monachium • Niemcy



www.medrx-diagnostics.com



1200 Starkey Rd., # 105, Largo, FL 33771 USA

Bezpłatna infolinia: (888) 392-1234 • (727) 584-9600

Faks: (727) 584-9602 • E-mail: medrx@medrx-diagnostics.com

www.medrx-diagnostics.com



Autoryzowany przedstawiciel MedRx w Europie

DGS Diagnostics A/S

Audiometer Alle 1 • 5500 Middelfart • Dania

Dystrybutor: MedRx International

DGS Diagnostics Sp. z o.o.

Rosówek 43

72-001 Kołbaskowo, Polska

Tel.: +48 91 835 63 00

E-mail: orders@medrx-diagnostics.com

www.medrx-diagnostics.com



Zarchiwizowane instrukcje MedRx są dostępne na stronie www.medrx-diagnostics.com/support/manuals-studio-software/archive

Spis treści

Wymagania dotyczące komputera	4
Instalacja oprogramowania	5
Podłączanie urządzenia	7
Ustawienia karty dźwiękowej	8
Połączenie z bazą danych	10
Skargi/zgłaszanie incydentów bezpieczeństwa	12
Ograniczona gwarancja	13





Wymagania dotyczące komputera

MedRx – minimalne specyfikacje komputera:

Komputer kompatybilny z systemem Windows®
Procesor Intel™ i5, 2,0 GHz lub lepszy
4 GB pamięci RAM
20 GB wolnego miejsca na dysku twardym
Gniazdo USB 2.0
System operacyjny Windows 10 lub 11 Professional
Kompatybilny z USB 3.0

MedRx – zalecane specyfikacje komputera:


Komputer kompatybilny z systemem Windows®
Czterordzeniowy procesor Intel™ i5 lub lepszy
Co najmniej 8 GB pamięci RAM
Gniazdo USB 3.0
Karta graficzna z dedykowaną pamięcią wideo 2 GB
50 GB lub więcej wolnego miejsca na dysku twardym
Szybkie połączenie internetowe
Windows 10 lub 11 Professional
Kompatybilny z USB 3.0

Instalacja oprogramowania




1. Włóż dysk USB MedRx do portu USB:

- Uruchom **Mój komputer**
- Zlokalizuj dysk USB

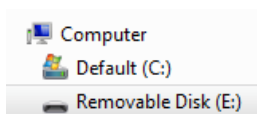

(E:) może się różnić w zależności od wybranego portu USB.
Zapoznaj się z dokumentacją komputera.

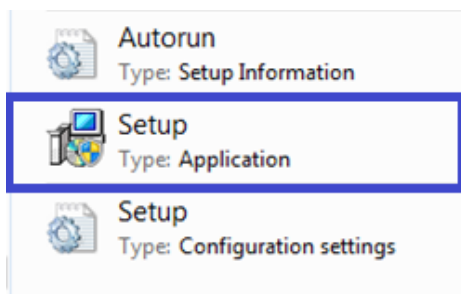


2. Kliknij dwukrotnie ikonę **Setup**(„Konfiguracja”), aby uruchomić:

UWAGA: W przypadku pojawienia się monitu kliknij *Accept Permission to Install Software* („Zaakceptuj pozwolenie na instalację oprogramowania”).




3. Na ekranie konfiguracji wybierz opcję **Install MedRx Studio** („Zainstaluj MedRx Studio”).

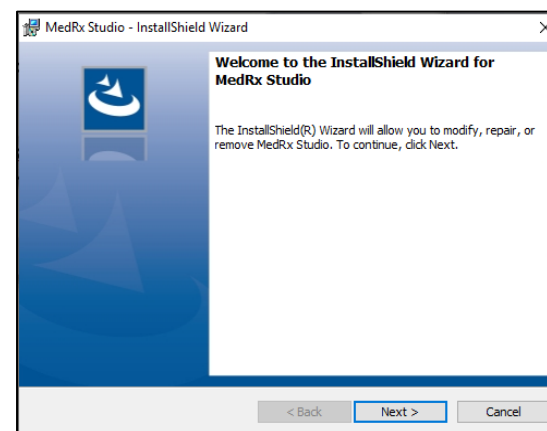


4. To jest ekran powitalny.

- Aby kontynuować, kliknij **Next** („Dalej”).

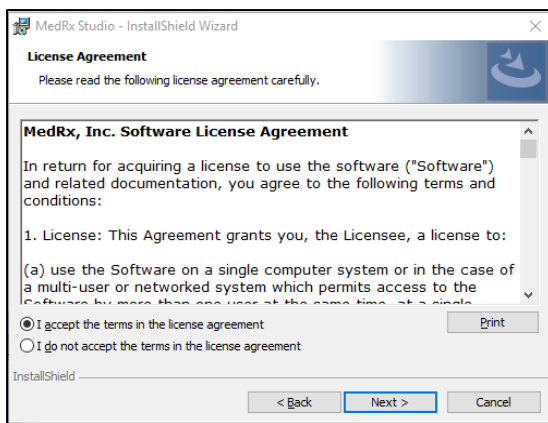


5. Przeczytaj umowę licencyjną oprogramowania. Ten ważny dokument określa dopuszczalne użycie oprogramowania Studio.

- Po przeczytaniu umowy wybierz **I accept...** („Akceptuję”).
- Kliknij **Next** (Dalej).

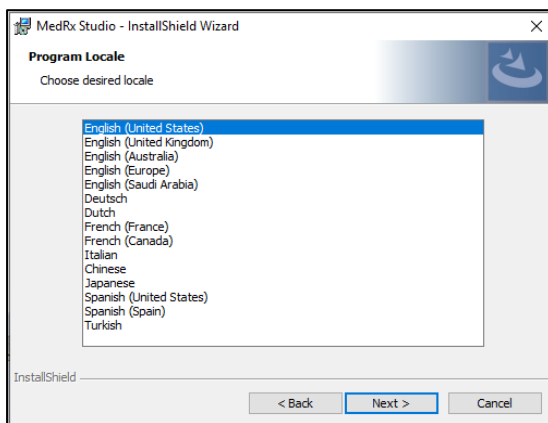

6. Na tym ekranie wprowadza się zmiany ustawień języka i lokalizacji.


- Dokonaj wyboru i kliknij **Next** („Dalej”).

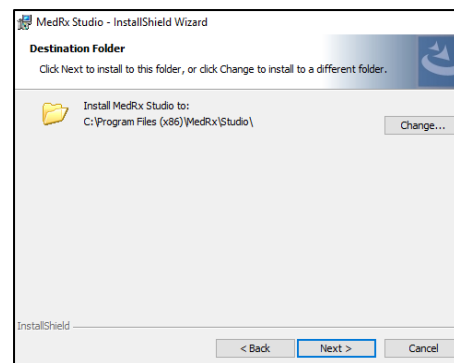

7. Ten ekran wskazuje lokalizację plików programu.


Dla większości użytkowników zalecana jest domyślna lokalizacja. W razie potrzeby tę lokalizację można zmienić.

- Aby kontynuować ustawienia domyślne, kliknij przycisk **Next** („Dalej”).
UWAGA: Aby zmienić lokalizację plików (zaawansowani użytkownicy lub tylko administratorzy systemu), kliknij przycisk „Change” („Zmień”).

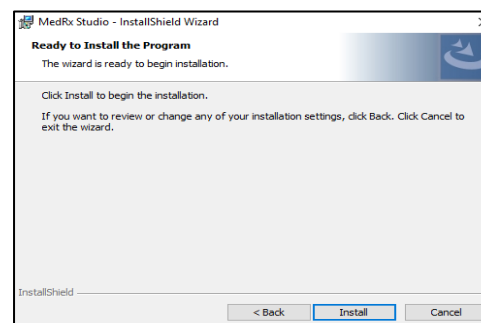


8. Instalacja programu jest gotowa do uruchomienia.

- Aby kontynuować, kliknij **Install** („Zainstaluj”).
- Aby wprowadzić zmiany, kliknij „Back” („Wstecz”).

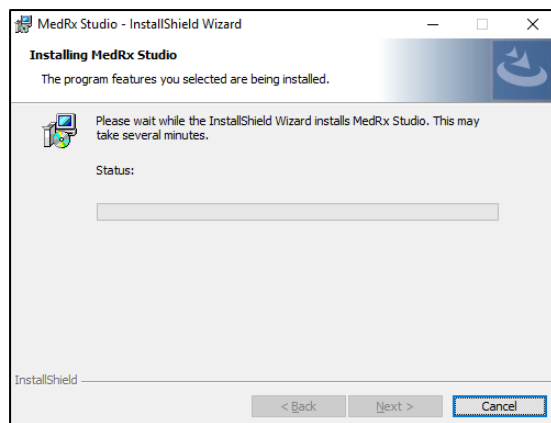

9. Trwa instalacja.

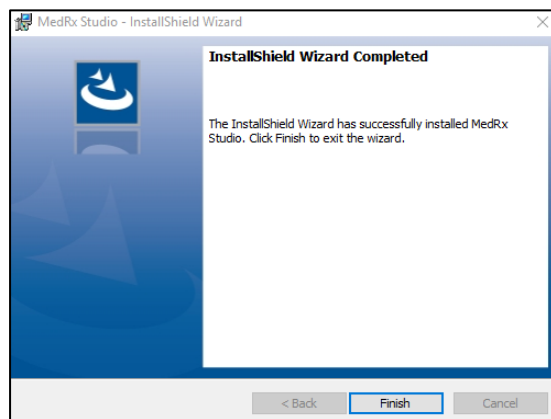


10. Po zakończeniu instalacji

- kliknij przycisk **Finish** („Zakończ”).


Podłączanie urządzenia

Twoje produkty MedRx są zasilane przez USB.

Podłącz przewód USB z urządzenia MedRx do komputera.

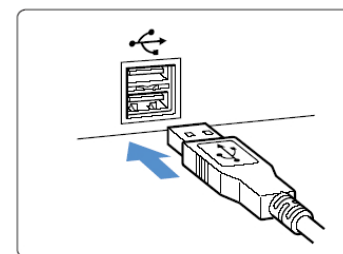

Poczekaj, aż system skopiuje i zainstaluje domyślne sterowniki Windows.

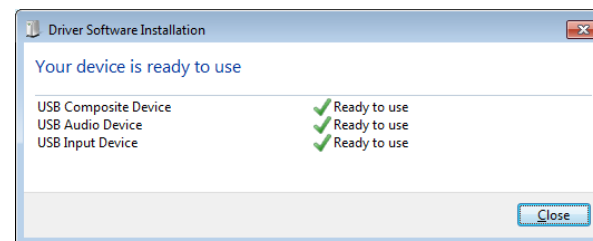

Gdy pojawi się ten ekran i wszystkie urządzenia są „gotowe do użycia”,


- kliknij **Close** („Zamknij”).

Ustawienia karty dźwiękowej


Następnie musisz potwierdzić lub ustawić domyślne ustawienia karty dźwiękowej Windows. Spowoduje to przekierowanie wszystkich dźwięków systemu Windows innych niż MedRx do wewnętrznej karty dźwiękowej komputera. (Dźwięki te obejmują powiadomienia o zdarzeniach, takie jak nowa wiadomość e-mail i ostrzeżenia o błędach, a także odtwarzanie plików audio i wideo.)



1. Kliknij **prawym przyciskiem myszy** ikonę głośnika na pasku zadań.

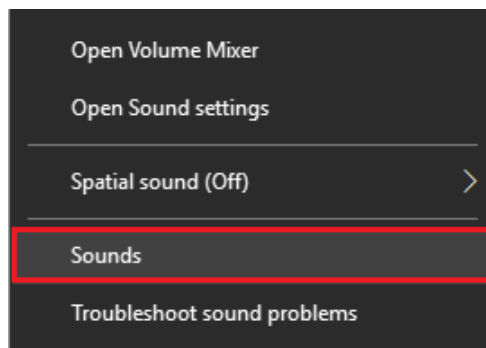


2. Wybierz opcję **Sounds** („Dźwięki”) z listy.

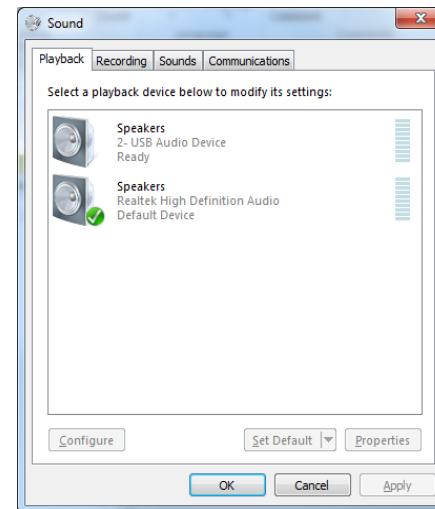

3. W panelu sterowania Windows Sound, na karcie „Playback” („Odtwarzanie”) i karcie „Recording” („Nagrywanie”) upewnij się, że urządzenie audio MedRx nie jest ustawione jako domyślne. Jeśli jest to ustawienie domyślne, zmień je klikając systemowe urządzenie audio (inne niż MedRx), a następnie wybierz opcję „Set Default” („Ustaw jako domyślne”).

UWAGA: Wewnętrzna karta dźwiękowa w komputerze prawdopodobnie nie będzie miała takiej samej nazwy jak ta na zrzucie ekranu. Sprawdź w dokumentacji komputera nazwę wewnętrznej karty dźwiękowej i odpowiednio ustaw to sterowanie.

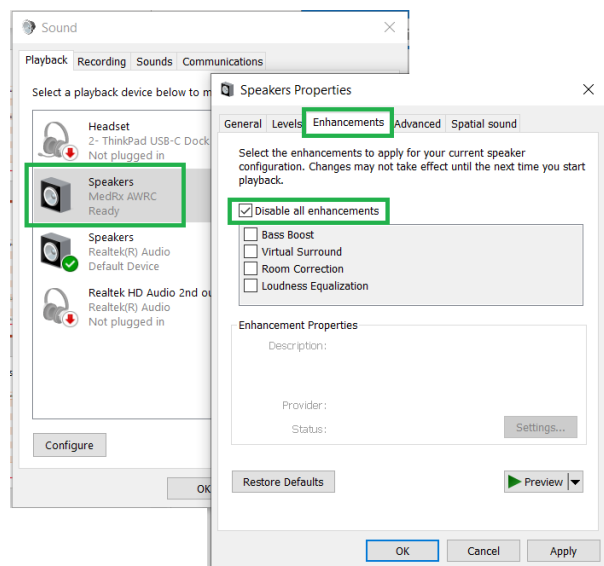

Ulepszenia mogą nie być dostępne na wszystkich komputerach. Nie dotyczy to komputerów bez ulepszeń audio.

6. Kliknij **OK**.

Gratulacje! Konfiguracja nowego urządzenia MedRx powiodła się


4. Na panelu sterowania dźwiękiem systemu Windows, na karcie **Playback** („Odtwarzanie”) kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie MedRx i wybierz właściwości. Przejdź do karty **Enhancements** („Ulepszenia”) i wybierz opcję **Disable all enhancements** („Wyłącz wszystkie ulepszenia”). Następnie kliknij „Apply” („Zastosuj”) i „OK”.

Ulepszenia mogą nie być dostępne na wszystkich komputerach. Nie dotyczy to komputerów bez ulepszeń audio.


5. Na panelu sterowania dźwiękiem systemu Windows, na karcie **Nagrywanie** kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie MedRx i wybierz właściwości. Przejdź do karty **Ulepszenia** i kliknij opcję **Wyłącz wszystkie ulepszenia**. Następnie kliknij „Apply” („Zastosuj”) i „OK”.

Połączenie z bazą danych

Oprogramowanie MedRx Studio może współpracować z systemami Noah, OtoAccess, MS SQL Express lub bez dostępu do bazy danych.

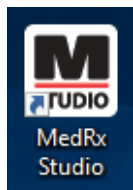


Aby skonfigurować bazę danych, kliknij dwukrotnie ikonę MedRx Studio na pulpicie Windows.

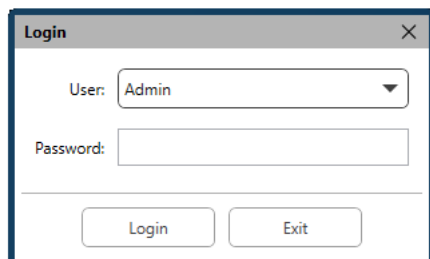

Jeśli pojawi się okno logowania, kliknij przycisk „Login” („Zaloguj”). Przy pierwszej instalacji nie ma ustawionego hasła.




Kliknij koło zębate ustawień w prawym górnym pasku menu.

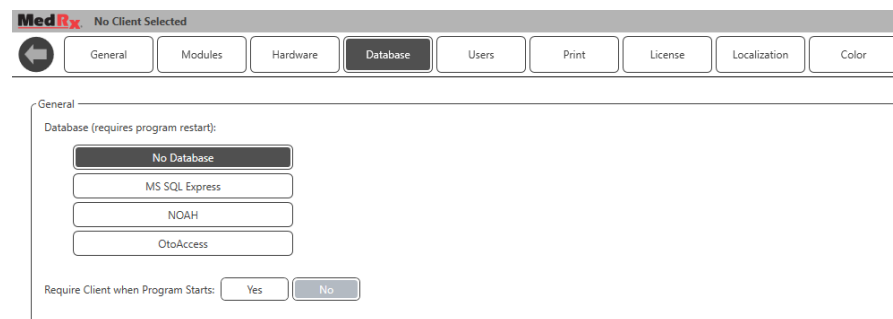

Wybierz pozycję „Database” („Baza danych”) z dostępnych kart. Kliknij żądaną bazę danych. Aby zastosować zmiany, zamknij oprogramowanie MedRx Studio.

Uwaga: Wyświetlane będą jedynie skonfigurowane bazy danych.

Konfiguracja bazy danych

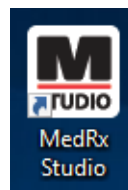


Without a Database (Bez bazy danych)

- Kliknij dwukrotnie skrót MedRx Studio na pulpicie Windows.




Noah

- Pobierz i zainstaluj oprogramowanie Noah.
- Uruchom system Noah.
- Wybierz pacjenta.
- Uruchom moduł MedRx Studio zgodnie z procedurami Noah.

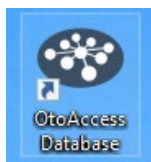

OtoAccess

- Pobierz i zainstaluj OtoAccess.
- Uruchom OtoAccess.
- Wybierz pacjenta.
- Uruchom moduł MedRx Studio zgodnie z procedurami OtoAccess.

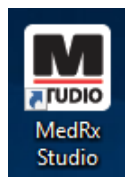


MS SQL Express


- Pobierz i zainstaluj MS SQL Express.
- Uruchom konfigurację bazy danych MedRx MS SQL.

- Kliknij dwukrotnie skrót MedRx Studio na pulpicie Windows.

Uwaga: MedRx umożliwia łączenie się z bazami danych SQL. Właściciel bazy danych musi skonfigurować bazę danych i zasady tworzenia kopii zapasowych tak, aby spełniały one lokalne wymagania prawne.

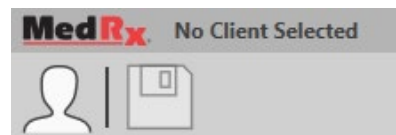

- **Wybierz pacjenta** w lewym górnym rogu ekranu.

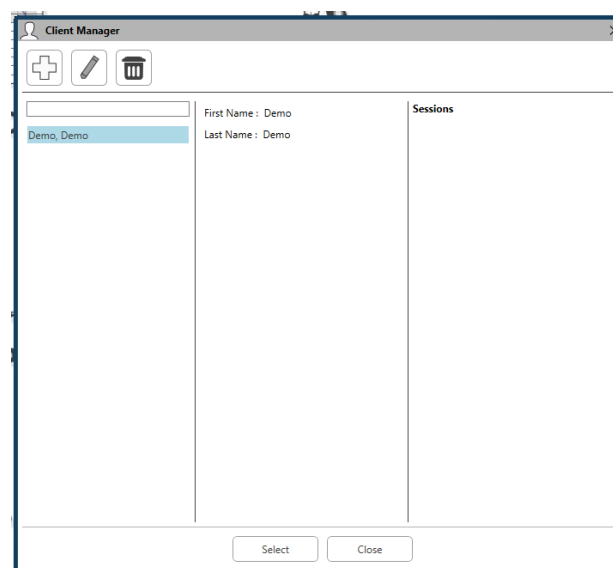

- + – Utwórz pacjenta.
- **Ołówek** – Edytuj pacjenta.
- **Kosz na śmieci** – Usuń pacjenta.

Skargi/zgłaszanie incydentów bezpieczeństwa

W przypadku wystąpienia incydentów związanych z wadami produktu (wadami sprzętu lub błędami oprogramowania) lub zdarzeniami niepożądanymi (które niekoniecznie mają związek przyczynowo-skutkowy z produktem) prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem. Zaleca się, aby użytkownik zgłosił wszystkie znane fakty dotyczące incydentu. W przypadku otrzymania informacji o jakimkolwiek poważnym incydencie mającym poważne skutki dla zdrowia pacjenta lub użytkownika (poważne zdarzenia niepożądane) lokalny dystrybutor ma obowiązek powiadomić o tym MedRx za pośrednictwem właściwego systemu nadzoru. MedRx zapewnia, że organ regulacyjny w kraju zamieszkania pacjenta zostanie poinformowany zgodnie z wymogami nadzoru. MedRx będzie rozpatrywać wszystkie reklamacje dotyczące produktów i zdarzenia niepożądane zgodnie z wewnętrzną procedurą.

Ograniczona gwarancja

MedRx gwarantuje, że ten produkt będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres dwóch lat od momentu zakupu. Jeśli w tym okresie zestaw nie będzie działał zgodnie z założeniem, nabywca jest odpowiedzialny za skontaktowanie się z firmą MedRx pod numerem +48 91 835 63 00. Przedstawiciel firmy doradzi właścicielowi, aby zwrócił określone podzespoły lub cały zestaw:

MedRx International
DGS Diagnostics Sp. z o.o.
Rosówek 43
72-001 Kołbaskowo
Polska

MedRx International naprawi lub wymieni wadliwe urządzenia, w pełni przetestuje system i/lub podzespoły i niezwłocznie wyśle system do właściciela. Naprawa lub wysyłka zwrotna nie wiąże się z żadnymi kosztami, pod warunkiem, że zestaw ma dwa lata lub mniej i nie został niewłaściwie użyty, wykorzystany ani uszkodzony. Takie uszkodzenia obejmują między innymi upuszczenie, narażenie na temperatury wyższe niż 37,78°C i uszkodzenie wodą/cieczą.

Naprawa lub wymiana zestawu zgodnie z niniejszą gwarancją jest jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym nabywcy. MedRx nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikowe lub przypadkowe, ani za naruszenie jakiegokolwiek wyraźnej lub dorozumianej gwarancji. Z wyjątkiem zakresu obowiązującego prawa, dorozumiana gwarancja, wartość handlowa lub przydatność tego produktu jest ograniczona do okresu obowiązywania niniejszej gwarancji.

MedRx International, według własnego uznania, będzie serwisować i naprawiać produkty gwarancyjne na życzenie nabywcy, w razie potrzeby naliczając opłaty za części i robociznę.

Ograniczona gwarancja zostaje unieważniona w przypadku zainstalowania w tym produkcie oprogramowania lub sprzętu, który nie został zatwierdzony przez firmę MedRx, Inc. Zatwierdzone oprogramowanie obejmuje moduły programowania Noah oraz HIMSA zatwierdzone przez producentów aparatów słuchowych, służące do ich dopasowywania.

MedRx International nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z instalacji niezatwierdzonego oprogramowania lub sprzętu. W przypadku niezatwierdzonego oprogramowania lub sprzętu zainstalowanego w systemie, który powoduje konflikt, MedRx wykona serwis produktu za opłatą, która zostanie ustalona w momencie świadczenia usługi.